


**Installatie:**

Sluit de ontvanger aan volgens dit schema:

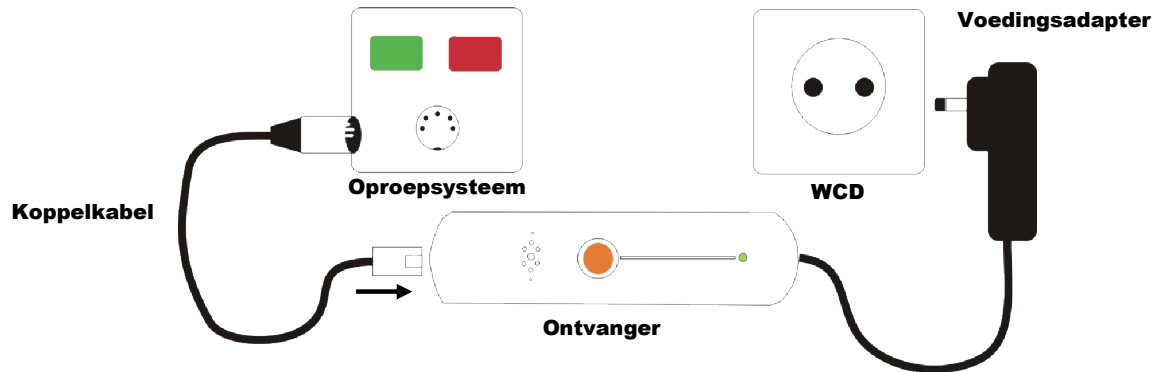

Plaats de sensor, kijkend richting het bed, op de vloer. (zie Fig.1). Voor een optimale detectie gelieve de sensor niet te dicht bij het bed plaatsen (minimaal 2 meter afstand). Zet de sensor **altijd** op de vloer. Bij voorkeur onder een tafel, stoel of kastje zodat men hier niet over kan struikelen. De sensor 'kijkt' horizontaal in een hoek van 90 graden, over een afstand tot c.a. zes meter.

Aanzetten:

1. Zet de ontvanger aan (middels oranje toets) en verlaat de kamer.
2. De **sensor** schakelt zichzelf automatisch in wanneer deze gedurende 15 seconden **geén** beweging over de vloer heeft waargenomen.

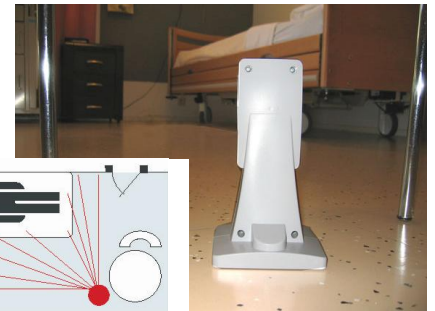


Fig.1

Uitzetten:

1. Loop de kamer in en zet de ontvanger uit (middels oranje toets).
2. Stel evt. het alarm op het oproepsysteem af.

Batterij leeg melding:

Zodra de batterij van de Optiscan© bijna leeg is, zal de led van de **ontvanger** iedere 2 seconden rood oplichten.

Batterij vervangen:

Vervang deze alleen door een 3,6 volt lithium cel van het formaat ½ AA.

Alleen bij het gebruik van een originele batterij van het merk Tadiran type TL2150 kan een juiste werking worden gegarandeerd.

Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de steun.

Vervang de batterij volgens Fig. 2. Let op: plus(+) pool aan de onderzijde.

Na het sluiten van de Optiscan© zal de sensor tussen 2 en de 5 minuten nodig hebben om te kalibreren. Dit is te zien door het regelmatig oplichten van het rode lampje achter de sensor lens.



Fig.2

RAAK NOOIT HET ELEMENT IN DE SENSOR AAN!**Serienummer / set aanduiding:**

De **serienummers** van beide componenten van de set zijn gelijk. Dit geeft aan, dat de sensor en de ontvanger bij elkaar horen. U kunt deze dan ook niet onderling met een andere set uitwisselen.

