



Deze draadloze Optiscan werkt o.a. samen in combinatie met een ontvanger artikelcode 1311 of 1312

Installatie:

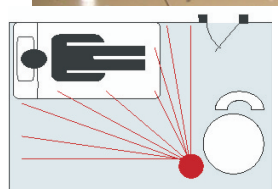
Plaats de sensor, kijkend richting het bed, op de vloer. (zie tekening). Het geniet sterk de voorkeur deze op minimaal op 3 meter afstand van het bed te plaatsen. Zet de sensor onder een tafel, stoel of kastje zodat men hier niet over kan struikelen. De sensor 'kijkt' in een hoek van 90 graden, over een afstand van c.a. 7 mtr.

**Aanzetten:**

1. Zet de ontvanger aan (zie handleiding ontvanger art. nr. 1311 of 1312)
2. Verlaat de kamer.
3. De sensor schakelt zichzelf automatisch in wanneer deze gedurende 15 seconden **geén** beweging over de vloer heeft waargenomen.

**Uitzetten:**

1. Loop de kamer in en zet de ontvanger uit.
2. Stel evt. het alarm op het verpleegoproepsysteem af.

**Batterij vervangen:**

De ontvanger geeft een melding als de batterij in de sensor vervangen dient te worden (zie handleiding ontvanger).

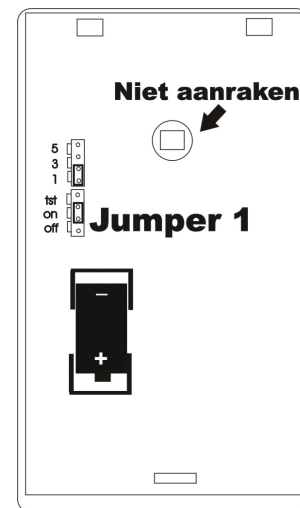
Vervang deze alleen door een 3,6 volt lithium cel van het formaat ½ AA.

Alleen bij het gebruik van een originele batterij van het merk Tadiran type TL2150 kan een juiste werking worden gegarandeerd.

Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de steun.

Vervang de batterij volgens tekening. Plus pool aan de onderzijde.

Na het sluiten van de sensor steun zal de sensor tussen 2 en de 5 minuten nodig hebben om te kalibreren. Dit is te zien door het regelmatig oplichten van het rode lampje achter de sensor lens.

**RAAK NOOIT HET ELEMENT IN DE SENSOR AAN!****Serienummer / set aanduiding:**

Op de onderzijde bevindt zich een sticker waarop het serie nummer staat vermeld en een combinatie van letters en cijfers kan worden aangestreept. Streep een zelfde combinatie aan op de ontvanger (receiver) om zo te markeren dat deze op elkaar zijn ingelezen en dus als set bij elkaar horen.

