

1009 - 1109

Gebruiksaanwijzing Optiscan sensor standalone met ingebouwde zender van derde:



Algemeen:

In deze draadloze Optiscan sensor is een zender verwerkt die rechtstreeks communiceert met uw zorgtelefoon / verpleegroepsysteem. Deze zender zal ingelezen moeten worden op de zorgtelefoon / verpleegroepsysteem voor dat u deze sensor kunt gebruiken. Door de sensor met de schakelaar 3x kort achterelkaar in en weer uit te zetten kan men de sensor automatisch en alarm laten zenden. Daar het voor sommige type zorgtelefoons nodig is om 2 x een oproep achterelkaar te maken zal de zender 2 x aangestuurd worden.

Installatie:

Plaats de sensor, kijkend richting het bed, op de vloer. (zie tekening). Het geniet sterk de voorkeur deze op minimaal op 2 meter afstand van het bed te plaatsen. Zet de sensor onder een tafel, stoel of kastje zodat men hier niet over kan struikelen.

Aanzetten:

1. Zet de sensor aan door achterop de steun de schakelaar op "1" te zetten (0 is uit).
2. Verlaat de kamer.
3. De sensor schakelt zichzelf automatisch in wanneer deze gedurende 15 seconden **géén** beweging over de vloer heeft waargenomen.


Note: **De sensor zal de eerste 5 sec. na inschakeling met de schakelaar nog geen alarmen doorzenden. Dit om een vals alarm bij inschakelen te voorkomen.**



Uitzetten:

1. Loop de kamer in en zet de sensor uit.
2. Stel evt. het alarm op het zorgtelefoon / verpleegoproepsysteem af.

Tussen het detecteren van een beweging en het aansturen van de zender zit een vertraging van 2 sec. Dit geeft u de kans om binnen die tijd de sensor uit te zetten zodat de zender niet wordt aangestuurd. Het is mogelijk deze tijd nog eens extra met 3 of 5 sec. te verlengen. Dit doet u door jumper 2 op positie 3 of 5 te zetten (zie Fig. 1).

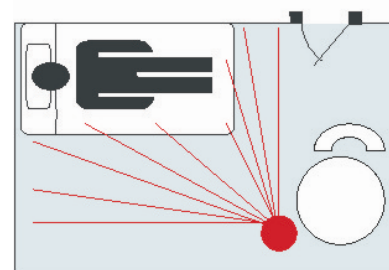

De sensor 'kijkt' in een hoek van 90 graden, over een afstand van c.a. 7 mtr.

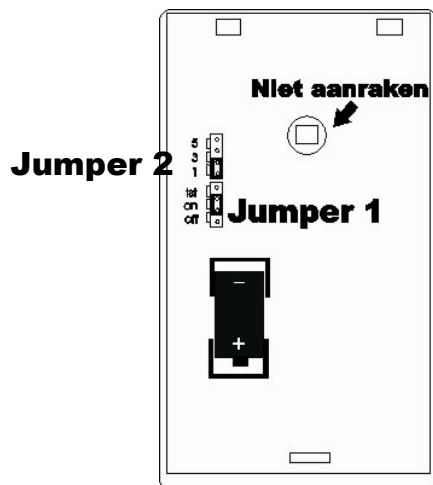


Fig. 1

Batterij vervangen:

Wanneer de gele led aan de achterzijde om de 2 a 3 seconde oplicht moet de batterij zo snel mogelijk vervangen worden. Vervang deze alleen door een 3,6 volt lithium cel van het formaat ½ AA.

Alleen bij het gebruik van een originele batterij van het merk Tadiran type TL2150 kan een juiste werking worden gegarandeerd.

Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de steun. Vervang de batterij volgens tekening met de plus pool aan de onderzijde. Na het sluiten van de sensor steun zal de sensor tussen 2 en de 5 minuten nodig hebben om te kalibreren. Dit is te zien door het regelmatig oplichten van het rode lampje achter de lens van de sensor.

RAAK NOOIT HET ELEMENT IN DE SENSOR AAN!