

# 9020 - 9021

## Gebruiksaanwijzing Optiseat:



Op het bedieningskastje bevindt zich een lampje om aan te geven of het kussen 'aan' of 'uit' staat (groen of rood) en een druktoets om het kussen aan/uit te zetten.

### **Controle of systeem aan of uit staat:**

- druk kort op druktoets
- het lampje geeft aan of het systeem aan of uit staat. Rood is uit, groen is aan.

### **Aan- en uitzetten:**

- druktoets gedurende 3 seconden ingedrukt houden
- het lampje wisselt van status en het systeem staat nu aan of uit.
- dit wordt tevens met pieptoonjes kenbaar gemaakt. 2 korte piepjes is aan, 1 piep is uit.
- Wanneer er iemand op het kussen gaat zitten, zal het lampje op het bedieningskastje de status van het systeem laten zien.

### **Herinnerfunctie:**

- wanneer het systeem wordt uitgezet en een cliënt uit de stoel wordt geholpen, zal bij een volgende keer wanneer de stoel wordt gebruikt, het kussen 9 korte piepjes laten horen om de verzorgende erop te attenderen, dat het systeem uit staat.
- deze herinnering wordt slechts één keer gegeven, zodat de stoel door b.v. bezoek gebruikt kan worden zonder dat het systeem wordt geactiveerd.

### **Standaard werkt de Optiseat als volgt:**

- zet het systeem aan
- wanneer de cliënt opstaat van de stoel, klinkt gedurende 4 seconden (instelbaar) een pieptoon. Dit om een eventueel aanwezig zelfcorrigerend vermogen van de cliënt te activeren.
- gaat cliënt niet binnen 4 seconden zitten, zal een oproepsignaal worden gestuurd naar de ontvanger of de pager.
- gaat cliënt wel binnen 4 seconden zitten, stopt het piepsignaal en gebeurt er niets.

### **Batterijen**

In de Optiseat dienen uitsluitend 2 stuks AA 1,5V (penlite) batterijen geplaatst te worden.

### **Batterij leeg melding:**

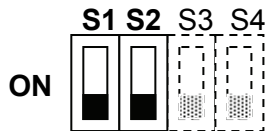
Wanneer de batterijen leeg raken, zal het lampje iedere 5 seconden even rood/groen knipperen. Als het systeem aan staat, zal daarbij ook elke minuut een pieptoonje hoorbaar zijn.

### **Afwijken van de standaard instellingen:**

Door de technische dienst kan de instelling van de standaardtijden en de snelheid van zenden worden gewijzigd. Zie technische handleiding.

**Openen van de unit.**

Voor het openen van de unit dient u vier schroeven te verwijderen. De onderste 2 schroeven bevinden zich in het batterijencompartiment.

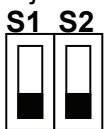
**Interne instellingen.****S1 + S2**

De Optiseat heeft een alarm vertraging. Dit is de tijd die de persoon heeft, om terug te gaan zitten voor het alarm gaat. Men kan hier kiezen uit 4 verschillende tijden. Deze tijden kunnen eventueel op aanvraag gewijzigd worden.

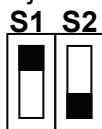
Keuze uit deze standaard tijden is: resp. 1, 4, 10 en 255 seconden. (Andere tijden optioneel)

De keuze uit deze 4 tijden geschied middels de eerste 2 schakelaars **S1 en S2**

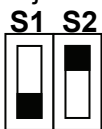
Tijd 1 sec.



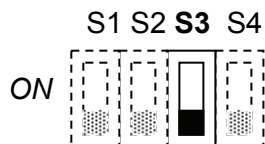
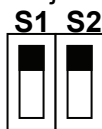
Tijd 4 sec.



Tijd 10 sec.

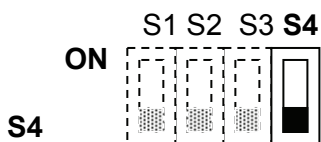


Tijd 255 sec.:

**S3**

Met de derde schakelaar (**S3**) kan de zoemer worden aan of uit gezet. Staat deze omhoog, (**ON**) is de zoemer hoorbaar tot het einde van de ingestelde alarm vertragingstijd.

Als **S3** naar beneden staat, (**OFF**) zal ongeachte de ingestelde alarm vertragingstijd, bij het opstaan slechts gedurende 1 seconde een pieptoon klinken.

**S4****S4 is niet van toepassing.****Batterij leeg melding:**

Wanneer om de 5 sec. het lampje rood/groen oplicht dienen de batterijen vervangen te worden.

Als het systeem aan staat dan zal ook om de minuut een korte pieptoon hoorbaar zijn. Vervang dan de 2 penlite batterijen. Als er te lang te lang gewacht wordt met het vervangen van de batterijen, zal er op de ontvanger of pager een batterij leeg melding verschijnen.

Bij gebruik van meerdere Optiseat® kussens op één ontvanger, is er op de ontvanger niet te zien welk kussen het is. U dient dan alle Optiseat® kussens te controleren.

**Let er bij het sluiten van de unit op dat het lampje in het daarvoor bestemde gaatje komt.**