




De Topscan wordt toegepast om in een zo vroeg mogelijk stadium alarm te krijgen als een persoon het bed wil gaan verlaten. Deze Topscan werkt o.a. samen in combinatie met een ontvanger artikelcode 1311 of 1312. Gebruik ook een vloer sensor (Art.# 1082) in combinatie met de Topscan om uit bed rollen onder de Topscan door toch te detecteren.

Installatie:

De Topscan moet op de juiste hoogte worden geplaatst zodat bij het half rechtop zitten er al detectie zal zijn. De juiste hoogte zal afhankelijk zijn van de situatie ter plaatsen. Vaak is dit rond de 40 centimeter bovenkant matras - hard sensor. Test voor dat u de ophangstrip op de muur schroeft het systeem goed uit.

Plaats de sensor volgens onderstaande tekening

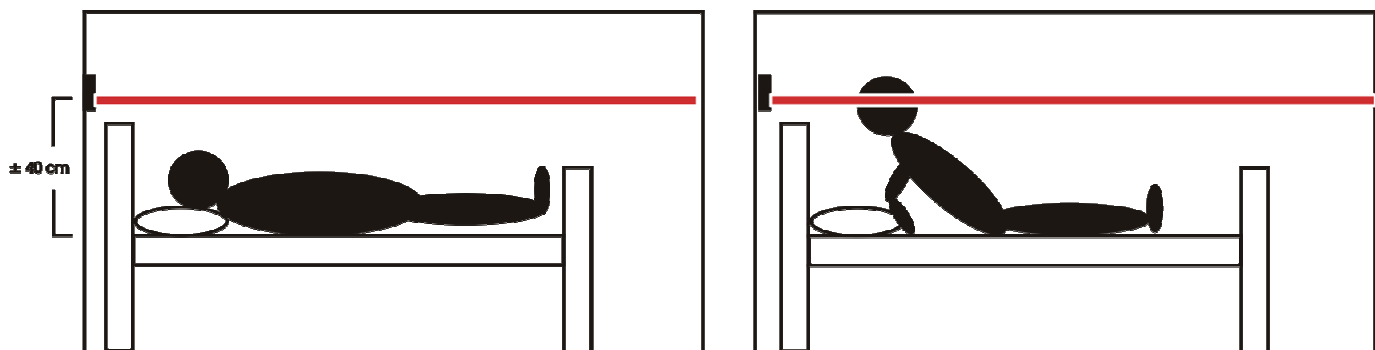

De sensor 'kijkt' in een hoek van 90 graden, over een afstand van c.a. 7 mtr. Bij gebruik van een papegaai aan het bed is het verstandig om de sensor iets uit het midden boven bed te plaatsen.

Aanzetten:

1. Zet de ontvanger aan (zie handleiding ontvanger art. nr. 1311 of 1312)
2. Verlaat de kamer.
3. De sensor schakelt zichzelf automatisch in wanneer deze gedurende 15 seconden **géén** beweging heeft waargenomen. Zet voor het uitmeten eventueel jumper 1 op TST zodat de sensor continu bij iedere beweging reageert. Plaats de jumper daarna weer op de ON stand.

Uitzetten:

1. Loop de kamer in en zet de ontvanger uit.
2. Stel evt. het alarm op het verpleegproepsysteem af.

Batterij vervangen:

De ontvanger geeft een melding als de batterij in de sensor vervangen dient te worden (zie handleiding ontvanger).

Vervang deze alleen door een 3,6 volt lithium cel van het formaat ½ AA. **Alleen bij het gebruik van een originele batterij van het merk Tadiran type TL2150 kan een juiste werking worden gegarandeerd.** Verwijder de schroef aan de bovenzijde van de sensor. Vervang de batterij volgens tekening. Plus pool aan de onderzijde.

Na het sluiten van de sensor steun zal de sensor tussen 2 en de 5 minuten nodig hebben om te kalibreren. Dit is te zien door het regelmatig oplichten van het rode lampje achter de sensor lens.

RAAK NOOIT HET ELEMENT IN DE SENSOR AAN!

