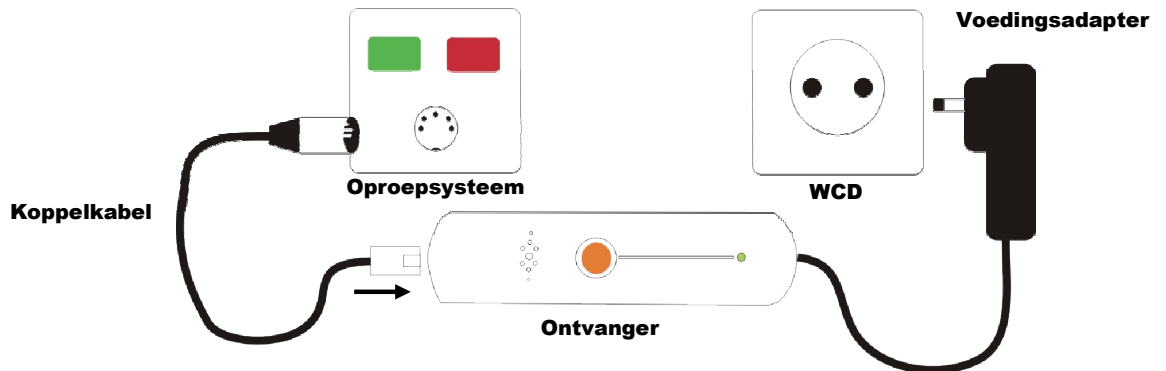


**Installatie:**

Sluit de ontvanger aan volgens dit schema:

**Gebruik:**

Enkele seconden nadat de voedingsadapter in de wandcontactdoos is gestoken, zal de ontvanger zichzelf inschakelen. De oranje toets heeft in deze set dan ook geen functie. De zender kan als medaillon (Fig. 2 en 3) of als horloge (Fig. 1) worden gedragen. Het drukken op de rode toets van de zender zal er voor zorgen dat er een alarm boodschap wordt verstuurd en door de ontvanger via de koppelkabel doorgegeven wordt aan het verpleegoproepsysteem. Tevens zal een rode led in de zender een aantal seconden oplichten.



Fig. 1.



Fig. 2.



Fig. 3.

**Batterij leeg melding:**

Zodra de batterij van de zender bijna leeg is, zal de led van de **ontvanger** iedere 2 seconden rood oplichten. Tevens zal op de zender bij het indrukken van de rode knop de led nu rood knipperen. Vervang de batterij dan zo snel mogelijk.

**Batterij vervangen:**

I.v.m. de spatwaterdichtheid mag de batterij alleen door gekwalificeerd personeel worden vervangen. Let op de rubberen afdichting bij het opnieuw sluiten van de behuizing. Vervang de batterij alleen door een zelfde type knoopcel. CR2025 (eenvoudig in de handel verkrijgbaar).

**Serienummer / set aanduiding:**

De **serienummers** van beide componenten van de set zijn gelijk. Dit geeft aan dat de halszender en de ontvanger bij elkaar horen. U kunt deze dan ook niet onderling met een andere set uitwisselen.

