

Gebruikershandleiding

Algemeen:

De draadloze Optiscan alarmeert wanneer iemand aanstalten maakt om het bed te verlaten. In deze variant is een zender van derde verwerkt die rechtstreeks communiceert met uw zorgtelefoon / verpleegroepsysteem. Deze zender zal ingelezen moeten worden voordat u deze kunt gebruiken. Door de sensor met de schakelaar 3x kort achterelkaar aan en weer uit te zetten kan men de zender automatisch en alarm laten zenden. Daar het voor sommige type zorgtelefoons nodig is om 2 x een oproep achterelkaar te maken zal de zender 2 x aangestuurd worden.

Installatie en gebruik:

Plaats de sensor, kijkend richting het bed, op de vloer (figuur 1). Zorg ervoor dat de sensor op een veilige plek staat, zodat de bewoner hier geen last van heeft, bijvoorbeeld onder een stoel of kast. **Het geniet sterk de voorkeur de sensor minimaal 2 meter van het bed te plaatsen.** De sensor kijkt in een hoek van 90 graden over een afstand van circa 5 meter. Zorg ervoor dat er geen objecten direct voor de sensor staan (figuur 2).



Figuur 1: Sensor Plaatsing

Aanzetten:

1. Zet de sensor aan door achterop de steun de schakelaar op "1" te zetten (0 is uit).
2. Verlaat de kamer.
3. De sensor schakelt zichzelf automatisch in wanneer deze gedurende 15 seconden **géén** beweging over de vloer heeft waargenomen.



Figuur 2: Kijkhoek Sensor

Note: *De sensor zal de eerste 5 sec. na inschakeling met de schakelaar nog geen alarmen doorzenden. Dit om een vals alarm bij inschakelen te voorkomen.*

Uitzetten:

1. Loop de kamer in en zet de sensor uit.
2. Stel eventueel het alarm af.

7009 / 7109

Draadloze Optiscan

03-11-2014 - V3.0



Gebruikershandleiding

Batterij vervangen:

Wanneer de led achter de lens elke 5 seconde kort rood oplicht moet de batterij van de sensor zo snel mogelijk vervangen worden.


Vervang deze alleen door een 3,6 volt lithium cel van het formaat 2/3 AA.

Alleen bij het gebruik van een originele batterij van het merk Saft, type LS17330 kan een juiste werking worden gegarandeerd (Daza art. nr. 7083).

Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de steun.

Vervang de batterij volgens fig. 3, met de plus pool naar rechts.

Na het vervangen van de batterij kan de sensor enige tijd nodig hebben om te kalibreren. Dit is te zien door het regelmatig oplichten van de groene led achter de lens.

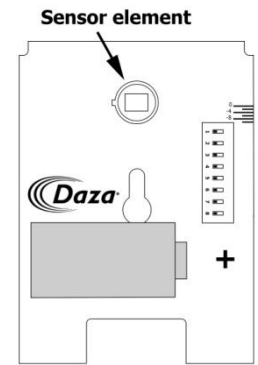

Figuur 3: Batterij plaatsing

RAAK NOOIT HET ELEMENT IN DE SENSOR AAN!

Inloopvertraging:

Tussen het detecteren van een beweging en het aansturen van de zender zit een tijdsvertraging van standaard 1 seconde. Indien gewenst kan deze vertraging worden verhoogd naar 3,5 of 10 seconden. Hierdoor krijgt u de mogelijkheid om de ontvanger uit te schakelen voordat er een alarm wordt verzonden. Dit doet u door Jumpers (figuur 4) te verzetten naar de bijbehorende stand.



1 seconde (standaard instelling)



3 seconden




5 seconden



10 seconden

Fabriekinstellingen

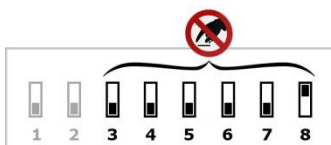

Schakelaar 3 t/m 8 mogen NOOIT verzet worden!!!

Bij wijzigingen kan een juiste werking van de sensor NIET worden gegarandeerd.