

# 4030 (RED)

Hals / Polszender set

29-04-2014 - V2.0




## Gebruikershandleiding

### Algemeen:

Zodra de druktoets wordt ingedrukt zal deze alarmeren en zal achter de druktoets een rode LED gaan branden. De zender is er in een antraciet en een rode uitvoering. De zender kan doormiddel van het standaard bijgeleverde koord om de hals worden gedragen. Middels artikel "1184-strap" kan de zender ook om de pols worden gebruikt. Voor het monteren van deze polsband behoeft de zender niet uit elkaar gehaald te worden. Het zacht stoffen elastische bandje kan er simpel doorheen worden geregen. De sensor werkt samen met de bijgeleverde ontvanger.

### Installatie ontvanger:

Koppel de ontvanger aan het verpleegoproepsysteem met de daarbij behorende koppelkabel. Sluit daarna de voedingsadapter aan een nabijgelegen wandcontactdoos (figuur 1).

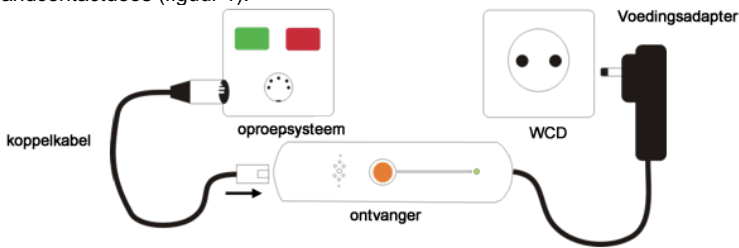


Figuur 1: Ontvanger

### Werking:

Enkele seconden nadat de voedingsadapter in de wandcontactdoos is gestoken, zal de ontvanger zichzelf inschakelen. De oranje toets heeft in deze set dan ook geen functie.

De zender wordt geactiveerd door op de drukknop te drukken. De zender zendt één alarm cyclus uit, ongeacht hoe lang er op de knop gedrukt wordt. De zender is water en stofdicht (IP67) en kan dus zondermeer onder de douche worden gedragen.

De zender stuurt een unieke code uit die alleen ontvangen kan worden door de bijbehorende ontvanger uit deze set.

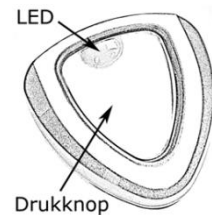


Figuur 2: Drukknop + LED

Als de knop ingedrukt wordt licht de rode LED achter de knop op ter indicatie dat de knop goed is ingedrukt en de alarmmelding wordt verzonden (figuur 2).

Als tijdens het indrukken van de knop de LED knippert is dat een teken dat de batterij bijna leeg is en deze zo snel mogelijk vervangen dient te worden. De batterij leeg melding wordt ook met de code meegestuurd en zal dus ook kenbaar worden gemaakt op de ontvanger of Pager.

De halszender wordt standaard geleverd met een halskoord. Het halskoord is voorzien van een veiligheidssluiting. Bij een ruk aan het koord zal dit open springen om persoonlijk letsel te voorkomen (figuur 3).

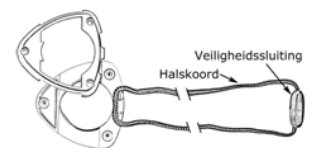

Figuur 3: Halskoord


### Batterij:

De voedingspanning voor de zender wordt geleverd door een 3 Volt Lithium cel, type CR2032.

De batterij heeft een levensduur van maximaal 32.000 oproepen. Openen van de halszender om de batterij te vervangen gebeurt door de 3 schroeven aan de achterzijde los te draaien. Nu kan het achterframe worden verwijderd (waartussen het halskoord is opgesloten) en daarna kan de behuizing geopend worden.

### Serienummer / set aanduiding:

De laatste vier cijfers van beide serienummers van de set zijn gelijk. Dit geeft aan dat de halszender en de ontvanger bij elkaar horen. U kunt deze dan ook niet onderling met een andere set uitwisselen (figuur 4).

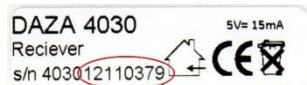

Figuur 4: Serie set aanduiding