


Installatie en gebruik

Optiscan (met schakelaar)

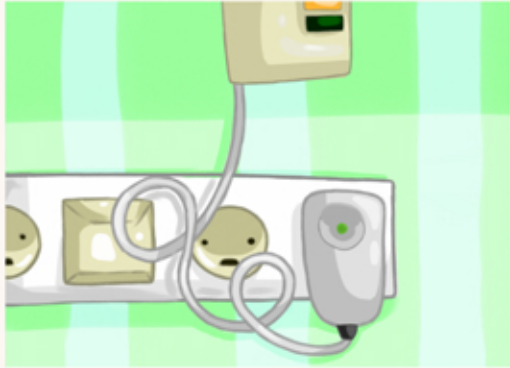

Sluit de ontvanger aan op het oproepsysteem.



Plaats de Optiscan op een veilige plaats op de vloer




onder bv. een stoel, kijkend in de richting van het bed.



Wanneer de persoon in bed ligt,



zet je de sensor bij het verlaten van de kamer aan.

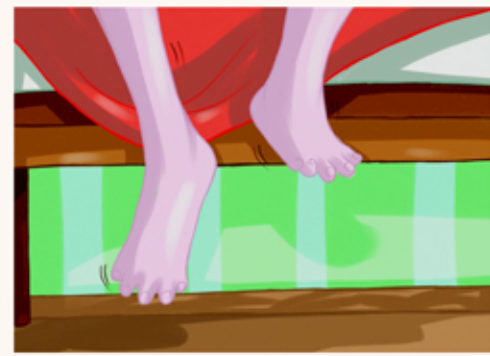

Zodra de persoon het bed dreigt te verlaten,



zal de Optiscan een alarm versturen



en komt de melding bij de verzorger,



die daardoor snel ter plaatse kan zijn.