

4540

Draadloze Optiseatset Plug & Play

23-05-2014 - V1.0




Gebruikershandleiding

Algemeen:

De draadloze Optiseat alarmeert wanneer iemand opstaat van een stoel. Staat men langer dan een ingestelde tijd dan zal de Optiseat alarmeren naar de bijbehorende ontvanger uit deze set, welke de voedingspanning betreft uit het verpleegoproepsysteem.

Installatie en gebruik:

Koppel de ontvanger aan het verpleegoproepsysteem met de daarbij behorende koppelkabel (figuur 1).

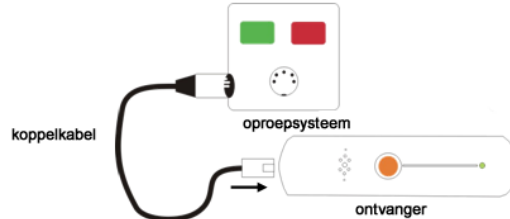

Figuur 1: Ontvanger

Enkele seconden nadat de ontvanger is gekoppeld aan het verpleegoproepsysteem, zal de ontvanger zichzelf inschakelen. De oranje toets heeft in deze set dan ook geen functie.

Bediening Optiseat:

Op het bedieningskastje van de Optiseat (figuur 2) bevindt zich een lampje om aan te geven of het kussen 'aan' of 'uit' staat (groen of rood) en een druktoets om het kussen aan/uit te zetten.

Controle of systeem aan of uit staat:

- druk kort op druktoets (figuur 2)
- het lampje geeft aan of het systeem aan of uit staat. Rood is uit groen is aan.

Aan- en uitzetten:

- druktoets gedurende 3 seconden ingedrukt houden
- het lampje wisselt van status en het systeem staat nu aan of uit.
- dit wordt tevens met pieptoonjes kenbaar gemaakt. 2 korte piepjes is aan, 1 piep is uit.
- Wanneer er iemand op het kussen gaat zitten, zal het lampje op het bedieningskastje de status van het systeem laten zien.



Figuur 2: druktoets + lampje

Herinnerfunctie:

wanneer het systeem wordt uitgezet en een cliënt uit de stoel wordt geholpen, zal bij een volgende keer wanneer de stoel wordt gebruikt, het kussen na 10 seconde vanzelf inschakelen.

Standaard werkt de Optiseat als volgt:

- zet het systeem aan
- wanneer de cliënt opstaat van de stoel, klinkt gedurende 4 seconden (instelbaar) een pieptoon. Dit om een eventueel aanwezig zelfcorrigerend vermogen van de cliënt te activeren.
- gaat de cliënt niet binnen 4 seconden zitten, dan zal een oproepsignaal worden gestuurd naar de bijbehorende ontvanger.
- gaat de cliënt wel binnen 4 seconden zitten, dan stopt het piepsignaal en gebeurt er niets.

Batterij leeg melding:

Wanneer om de 5 sec. het lampje rood/groen oplicht dienen de batterijen vervangen te worden. Als het systeem aan staat dan zal ook om de minuut een korte pieptoon hoorbaar zijn. Vervang dan de 2 penlite batterijen (AA 1,5V). Als er te lang te lang gewacht wordt met het vervangen van de batterijen, zal er op de ontvanger een batterij leeg melding verschijnen.

Afwijken van de standaard instellingen:

Door de technische dienst kan de instelling van de standaardtijden en de snelheid van zenden worden gewijzigd. Zie pagina 2 van de handleiding.

4540

Draadloze Optiseatset Plug & Play

23-05-2014 - V1.0



Gebruikershandleiding

Openen van de unit:

Voor het openen van de unit dient u vier schroeven te verwijderen. De onderste 2 schroeven bevinden zich in het batterijencompartiment.

Alarm vertraging S1 en S2:

De Optiseat heeft een alarm vertraging. Dit is de tijd die de persoon heeft, om terug te gaan zitten voor het alarm gaat. Men kan hier kiezen uit 4 verschillende tijden. Keuzes uit deze standaard tijden zijn: 1, 4, 15 seconden en 10 minuten. De laatste (10 minuten) kan eventueel op aanvraag gewijzigd worden. De keuze uit deze 4 tijden geschiedt middels de eerste 2 schakelaars **S1** en **S2** (figuur 3).



Figuur 3: Alarm vertraging

Zoemer schakelaar S3 en S4:

Met de derde schakelaar (**S3**) kan de tijd van de zoemer worden ingesteld. Staat deze omhoog (**ON**) is de zoemer hoorbaar tot het einde van de ingestelde alarm vertragingstijd. Staat **S3** naar beneden (**OFF**) is de zoemer 1 seconde hoorbaar, ongeacht de ingestelde alarm vertragingstijd. Met de vierde schakelaar (**S4**) kan de zoemer aan of uit geschakeld worden. Staat deze omhoog (**ON**) is de zoemer hoorbaar zoals ingesteld met **S3**. Staat **S4** naar beneden (**OFF**) is de zoemer helemaal uitgeschakeld bij alarm.



Figuur 4: Zoemer aan / uit

Let er bij het sluiten van de unit op dat het lampje in het daarvoor bestemde gaatje komt.

LET OP!!! Na verandering van de instellingen dient de Optiseat 1x uit- en ingeschakeld te worden om de nieuwe instellingen te activeren!