

8012/8112

Draadloze paddenstoelknop

01-01-2015 - V1.0






Gebruikershandleiding

Algemeen:

De draadloze paddenstoelknop alarmeert wanneer iemand de knop indrukt. De knop kan eenvoudig op tafel worden gebruikt. De draadloze paddenstoelknop is voorzien van een Daza zender en kan worden gebruikt in combinatie met alle DAZA ontvangers en pagers.

Alarmeren

U kunt een alarm genereren door de paddenstoelknop in te drukken met behulp van een hand of voet.

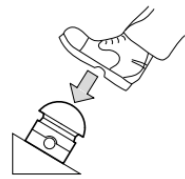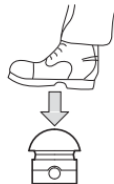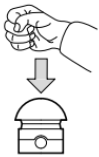

Batterij

De voedingspanning voor de zender wordt geleverd door een 3 Volt Lithium cel, type CR2032.

De batterij heeft een levensduur van maximaal 32.000 oproepen. Openen van de paddenstoelknop om de batterij te vervangen gebeurt door de 4 schroeven aan de voorzijde los te draaien.

Waarschuwing!

Als u de batterij door een onjuist type batterij vervangt, kan de 8012 defect raken. Voer gebruikte batterijen af volgens de geldende voorschriften

Inleren

De drukknop 8012 moet worden ingeleerd op een ontvanger/pager zodat deze ontvanger de drukknop kan herkennen. Raadpleeg de handleiding van de desbetreffende ontvanger/pager om de drukknop hier op in te leren.

Specificaties

Frequentie (MHz): 869.

Elektronisch

Interne Batterij: 3V batterij type CR2032

Opmerking: Voer gebruikte batterijen af volgens de geldende voorschriften.

Levensduur batterij: ongeveer 32.000 meldingen