

1089-1189

Türkontakt

01-01-2014 - V1



Gebrauchsanleitung

Montage des Türkontakts:

Befestigen Sie den unteren Teil mit Schrauben, doppelseitigen Klebeband oder Klettband am Türrahmen.

Setzen Sie die Platine zuerst in die Platinenstützen ein und drücken Sie die Platine dann beim Befestigungs-Clip an die richtige Stelle. Abb. 1.

Achten Sie beim Montieren der Abdeckkappe darauf, dass die Anschlussdrähte des Schalters nicht eingeklemmt werden. Die Markierung für die Magnetposition muss sich auf der Seite des Magneten befinden. Abb. 2. und Abb. 3. Montieren Sie den Magneten auf der Tür.



Um zu verhindern, dass der Patient den Türkontakt selbst ausschaltet, sollten Sie diesen vorzugsweise an der Außenseite der Tür montieren.

Anwendung (nur für 1189):

Einschalten: Verlassen Sie den Raum. Schalten Sie den Türkontakt bei geschlossener Tür ein (Schalter in Stand 1).

Ausschalten: Schalten Sie den Türkontakt aus, bevor Sie die Tür öffnen, um den Raum zu betreten (Schalter in Stand 0).

Meldung Batterie leer (nur in Kombination mit Daza Empfänger und Pager):

Wenn die Batterie des Türkontakts beinahe leer ist, leuchtet die LED des Daza Empfängers alle 2 Sekunden rot auf. Der Pager zeigt ein leeres Batteriesymbol.

Batterie austauschen:

Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie desselben Typs: CR2 ½ AA 3 Volt. Artikel 1183