


4020

Türkontakt set


01-01-2014 - V1.-

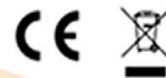

Gebrauchsanleitung

Installation:

Schließen Sie den Empfänger nach diesem Schema an:

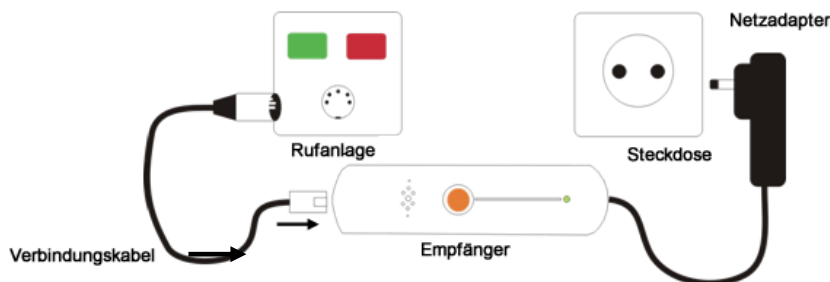

Montage des Türkontakts:

Befestigen Sie den unteren Teil mit Schrauben, doppelseitigen Klebeband oder Klettband am Türrahmen. Setzen Sie die Platine zuerst in die Platinenstützen ein und drücken Sie die Platine dann beim Befestigungs-Clip an die richtige Stelle. Abb. 1.

Achten Sie beim Montieren der Abdeckkappe darauf, dass die Anschlussdrähte des Schalters nicht eingeklemmt werden. Die Markierung für die Magnetposition muss sich auf der Seite des Magneten befinden. Abb. 2. und Abb. 3. Montieren Sie den Magneten auf der Tür.



Um zu verhindern, dass der Patient den Türkontakt selbst ausschaltet, sollten Sie diesen vorzugsweise an der Außenseite der Tür montieren.

Anwendung:

Einige Sekunden, nachdem der Netzadapter in die Steckdose gesteckt wurde, schaltet sich der Empfänger selbst ein. Die orangefarbene Taste hat in diesem Set daher auch keine Funktion. **Einschalten:** Verlassen Sie den Raum. Schalten Sie den Türkontakt bei geschlossener Tür ein (Schalter in Stand 1). **Ausschalten:** Schalten Sie den Türkontakt aus, bevor Sie die Tür öffnen, um den Raum zu betreten (Schalter in Stand 0).

Meldung Batterie leer:

Wenn die Batterie des Türkontakts beinahe leer ist, leuchtet die LED des **Empfängers** alle 2 Sekunden rot auf.

Batterie austauschen:

Ersetzen Sie die Batterie nur durch eine Batterie desselben Typs: CR2 ½ AA 3 Volt. Artikel 1183

Seriennummer / Set-Angabe:

Die **Seriennummern** der beiden zum Set gehörenden Teile sind identisch. Damit wird angegeben, dass der Türkontakt und der Empfänger zusammengehören. Die Sets sind untereinander nicht austauschbar.

