

4030 - 4030 RED (Mit rote Taste)

Sender-Set für Handgelenk/Hals


01-01-2014 - V1



Gebrauchsanleitung

Installation:

Schließen Sie den Empfänger nach diesem Schema an:

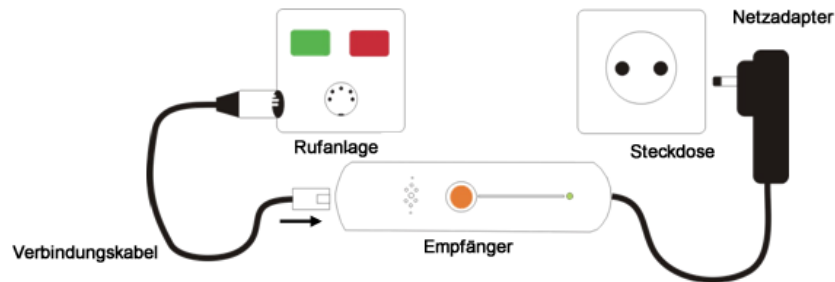

Anwendung:

Einige Sekunden, nachdem der Netzadapter in die Steckdose gesteckt wurde, schaltet sich der Empfänger von selbst ein. Die orangefarbene Taste hat bei diesem Set daher auch keine Funktion. Der Sender kann als Medaillon (Abb. 1) oder als Uhr (Abb. 2) getragen werden. Wenn die rote Taste des Senders gedrückt wird, wird eine Alarmmeldung ausgesendet und vom Empfänger über das Verbindungskabel an das Notrufsystem des Pflegepersonals weitergeleitet. Außerdem leuchtet im Sender mehrere Sekunden lang eine rote LED auf.



Abb. 1.



Abb. 2.

Meldung Batterie leer:

Wenn die Batterie des Senders beinahe leer ist, leuchtet die LED des **Empfängers** alle 2 Sekunden rot auf. Wird jetzt die rote Notruftaste gedrückt, blinkt auf dem Sender zusätzlich ein rotes Led-Licht. Tauschen Sie die Batterie dann möglichst schnell aus.

Seriennummer / Set-Angabe:

Die **Seriennummern** der beiden zum Set gehörenden Teile sind identisch. Damit wird angegeben, dass der Halssender und der Empfänger zusammengehören. Die Sets sind untereinander nicht austauschbar.

