

# Bedienungsanleitung

### Allgemein:

Diese drahtlose Optiseat alarmiert wenn eine Person Aufsteht von einem Stuhl. Wenn die Person länger steht als eine voreingestellte Zeit, die Optiseat alarmiert zu dem entsprechenden Empfänger aus diesem Set.

### Installation und Benutzung:

Schließen Sie den Empfänger an die Rufanlage mit dem entsprechenden Drehmoment-Kabel. Dann stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose in der Nähe (Abbildung 1).

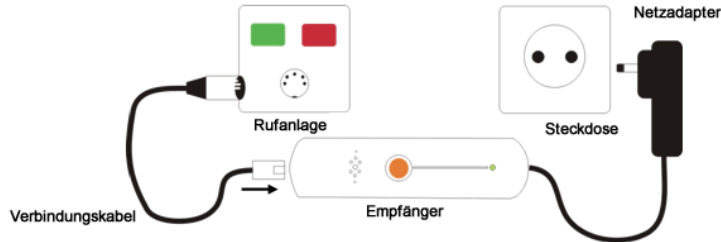


Abbildung 1: Empfänger

Einige Sekunden, nachdem der Netzadapter in die Steckdose gesteckt wurde, schaltet sich der Empfänger selbst ein. Die orange Taste hat in diesem Set daher keine Funktion.

### Betrieb Optiseat:

Auf der Bedienungseinheit befinden sich eine Kontrolllampe zur Anzeige, ob das Kissen eingeschaltet oder ausgeschaltet ist (grün oder rot) und ein Drucktaster, mit dem das Kissen ein- und ausgeschaltet werden kann.

### Kontrolle, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist:

- Betätigen Sie kurz den Drucktaster. (Abbildung 2)
- Die Lampe zeigt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Rot bedeutet Aus, Grün bedeutet Ein.

### Ein- und Ausschalten:

- Drucktaster 3 Sekunden lang eingedrückt halten
- Die Kontrolllampe ändert die Farbe und das System ist jetzt ein- oder ausgeschaltet.
- Der Status wird zugleich akustisch angezeigt. 2 kurze Pieptöne bedeutet eingeschaltet, 1 Piepton bedeutet ausgeschaltet.
- Wenn sich jemand auf das Kissen setzt, zeigt die Kontrolllampe auf der Bedienungseinheit den Status des Systems an.



Abbildung 2: Drucktaste + Kontrolllampe

### Erinnerungsfunktion:

- Wenn das System ausgeschaltet ist und ein Klient aus dem Stuhl geholfen wird, wird das Kissen bei der nächsten Benutzung automatisch eingeschaltet nach 10 Sekunden.

### Standardmäßig funktioniert der Optiseat wie folgt:

- Schalten Sie das System ein.
- Wenn der Klient vom Stuhl aufsteht, ertönt 4 Sekunden lang (einstellbar) ein Piepton. Dadurch soll eine eventuell vorhandene Fähigkeit des Klienten zur Selbstkorrektur aktiviert werden.
- Setzt sich der Klient nicht innerhalb von 4 Sekunden wieder hin, wird ein Rufsignal an den Empfänger oder an den Pager gesandt.
- Setzt sich der Klient innerhalb von 4 Sekunden wieder hin, hört das Piepsignal auf und es geschieht weiter nichts.

### Batteriestandsanzeige:

Sobald die LED rot / grün blinkt, sollten die Batterien ersetzt werden. Als Wenn das System eingeschaltet ist, ein kurzer Piepton wird jede Minute gehört werden. Ersetzen Sie die zwei AA-Batterien (AA 1,5 V). Wenn zu lange gewartet zum Ersetzen der Batterien wird eine Batterie schwach Meldung auf dem Empfänger angezeigt.

### Ändern der Standardeinstellungen:

Die Einstellung der Standardzeiten und der Geschwindigkeit des Sendeverkehrs kann vom technischen Kundendienst verändert werden. Siehe Seite 2

# 4040

Drahtlosen Optiseat set

06-10-2014 - V1.0



## Bedienungsanleitung

### Öffnen des Gerätes:

Zum Öffnen des Gerätes sind vier Schrauben zu entfernen. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.

### Alarmverzögerung S1 en S2:

Der Optiseat verfügt über eine Alarmverzögerung. Das ist die Zeit, die eine Person zur Verfügung hat, um sich wieder hinzusetzen, bevor die Alarmmeldung ausgelöst wird. Hier kann zwischen 4 verschiedenen Zeiten ausgewählt werden. Diese Zeiten können unter Umständen auf Anfrage geändert werden. Es kann eine der folgende Standardzeiten ausgewählt werden: entweder 1, 4, 10 oder 255 Sekunden (andere Zeiten sind optional). Die Auswahl einer dieser 4 Zeiten erfolgt mit den ersten beiden Schaltern S1 und S2 (Abbildung 3).

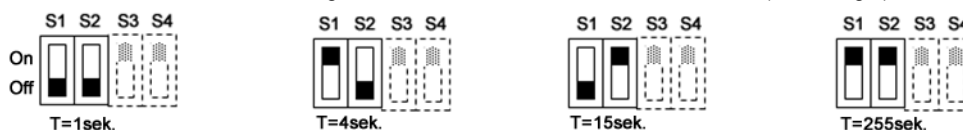


Abbildung 3: Alarmverzögerung

### Summer Schalter S3 en S4:

Mit dem dritten Schalter (S3) kann der Summer ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn der Schalter nach oben (ON) zeigt, ist der Summer bis zum Ablauf der eingestellten Alarmverzögerungszeit hörbar.

Wenn S3 nach unten zeigt (OFF), ertönt unabhängig von der eingestellten Alarmverzögerungszeit beim Aufstehen nur eine Sekunde lang ein Piepton. Mit der vierte Schalter (S4) kann der Summer völlig ausgeschaltet werden. Wenn der Schalter nach oben (ON) zeigt, funktioniert der Summer als mit S3 gesetzt. Wenn S4 nach unten zeigt (OFF), der Summer ist völlig ausgeschaltet.



Abbildung 4: Summer Schalter

**Achten Sie beim Schließen des Gerätes darauf, dass die Lampe in die dafür bestimmte Öffnung kommt.**

**HINWEIS! Nach der Änderung der Einstellungen muss die Optiseat 1x aus- und eingeschaltet werden um die neuen Einstellungen zu aktivieren**