



Auf der Bedienungseinheit befinden sich eine Kontrolllampe zur Anzeige, ob das Kissen eingeschaltet oder ausgeschaltet ist (grün oder rot) und ein Drucktaster, mit dem das Kissen ein- und ausgeschaltet werden kann.

### **Kontrolle, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist**

- Betätigen Sie kurz den Drucktaster.
- Die Lampe zeigt an, ob das System ein- oder ausgeschaltet ist. Rot bedeutet Aus, Grün bedeutet Ein.

### **Ein- und Ausschalten**

- Drucktaster 3 Sekunden lang eingedrückt halten
- Die Kontrolllampe ändert die Farbe und das System ist jetzt ein- oder ausgeschaltet.
- Der Status wird zugleich akustisch angezeigt. 2 kurze Pieptöne bedeutet eingeschaltet, 1 Piepton bedeutet ausgeschaltet.
- Wenn sich jemand auf das Kissen setzt, zeigt die Kontrolllampe auf der Bedienungseinheit den Status des Systems an.

### **Erinnerungsfunktion**

- Wenn das System ausgeschaltet und einem Klienten aus dem Stuhl geholfen wird, wird das Kissen bei der nächsten Benutzung des Stuhls 9 Pieptöne hören lassen, um die Pflegekraft darauf aufmerksam zu machen, dass das System ausgeschaltet ist.
- Diese Erinnerung erfolgt nur einmal, so dass der Stuhl z.B. von Besuchern benutzt werden kann, ohne dass das System aktiviert wird.

### **Standardmäßig funktioniert der Optiseat wie folgt**

- Schalten Sie das System ein.
- Wenn der Klient vom Stuhl aufsteht, ertönt 4 Sekunden lang (einstellbar) ein Piepton. Dadurch soll eine eventuell vorhandene Fähigkeit des Klienten zur Selbstkorrektur aktiviert werden.
- Setzt sich der Klient nicht innerhalb von 4 Sekunden wieder hin, wird ein Rufsignal an den Empfänger oder an den Pager gesandt.
- Setzt sich der Klient innerhalb von 4 Sekunden wieder hin, hört das Piepsignal auf und es geschieht weiter nichts.

## **Batterien**

In den Optiseat dürfen nur zwei 1,5V-Batterien Typ AA (Mignon) eingesetzt werden.

### **Batteriewechselanzeige**

Wenn die Batterien nahezu verbraucht sind, blinkt die Lampe alle 5 Sekunden kurz rot/grün. Wenn das System eingeschaltet ist, ist daneben auch im Minutenabstand ein Piepton hörbar.

### **Ändern der Standardeinstellungen**


Die Einstellung der Standardzeiten und der Geschwindigkeit des Sendeverkehrs kann vom technischen Kundendienst verändert werden. Siehe die technische Anleitung.



### Öffnen des Gerätes

Zum Öffnen des Gerätes sind vier Schrauben zu entfernen. Die unteren beiden Schrauben befinden sich im Batteriefach.

### Interne Einstellungen

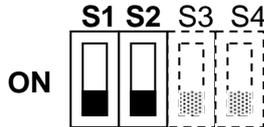


**S1 + S2**


Der Optiseat verfügt über eine Alarmverzögerung. Das ist die Zeit, die eine Person zur Verfügung hat, um sich wieder hinzusetzen, bevor die Alarmmeldung ausgelöst wird. Hier kann zwischen 4 verschiedenen Zeiten ausgewählt werden. Diese Zeiten können unter Umständen auf Anfrage geändert werden. Es kann eine der folgende Standardzeiten ausgewählt werden: entweder 1, 4, 10 oder 255 Sekunden (andere Zeiten sind optional).

Die Auswahl einer dieser 4 Zeiten erfolgt mit den ersten beiden Schaltern **S1 und S2**.


Zeit 1 sek.

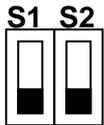



Zeit 4 sek.

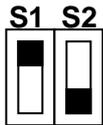

Zeit 10 sek.

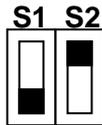


Zeit 255 sek.

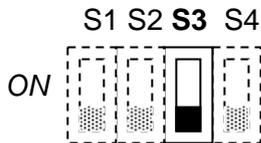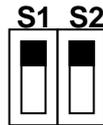

**S3**

Mit dem dritten Schalter (**S3**) kann der Summer ein- oder ausgeschaltet werden. Wenn der Schalter nach oben (**ON**) zeigt, ist der Summer bis zum Ablauf der eingestellten Alarmverzögerungszeit hörbar. Wenn **S3** nach unten zeigt (**OFF**), ertönt unabhängig von der eingestellten Alarmverzögerungszeit beim Aufstehen nur eine Sekunde lang ein Piepton.

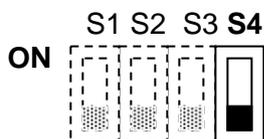

**S4**

**S4** trifft hier nicht zu.

### Batteriewechselanzeige

Wenn sowohl die rote als auch die grüne LED im Abstand von 5 Sekunden aufleuchten, müssen die Batterien ausgewechselt werden. Wenn das System eingeschaltet ist, ist im Abstand von 5 Minuten auch ein kurzer Piepton hörbar. Ersetzen Sie dann die beiden Mignonzellen. Wenn mit dem Auswechseln der Batterien zu lange gewartet wird, erscheint auf dem Empfänger oder Pager eine "Batterie leer"-Meldung. Wenn mehrere Optiseat®-Kissen an einen Empfänger angeschlossen sind, ist auf dem Empfänger nicht erkennbar, um welches Kissen es sich handelt. Sie müssen dann alle Optiseat®-Kissen kontrollieren.

**Achten Sie beim Schließen des Gerätes darauf, dass die Lampe in die dafür bestimmte Öffnung kommt.**