



1189 – Daza Deurcontact

V 2020 – 1.0

QUICKSTART GUIDE


INSTALLATIE

Vaste montage

- 1) VERWIJDER DE SCHROEF
- 2) VERWIJDER DE BEHUIZING VAN DE BASIS
- 3) DRUK OP DE KLEM EN VERWIJDER HET PLAATJE
- 4) MARKEER DE BOORGATEN EN MONTEER DE BASIS MET 2 VERZONKEN SCHROEVEN
- 5) PLAATS DE MAGNEET OP DE DEUR MET 2 SCHROEVEN

Let op er zit een markering op de behuizing. Deze markering moet richting de magneet zitten.

Indien u geen vaste montage wilt gebruik dan goede dubbelzijdige tape. Om te voorkomen, dat de cliënt het deurcontact zelf uitschakelt, dient u deze bij voorkeur aan de buitenzijde van de deur te monteren.

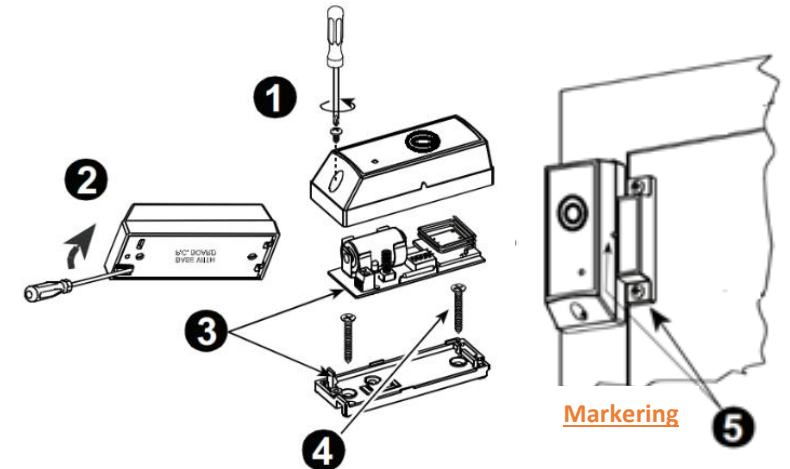

AAN / UIT SCHAKELN VAN HET DEURCONTACT

Inschakelen:

Het deurcontact werkt samen met de Daza ontvanger of Pager. Zorg dat deze in werking zijn en eventueel zijn verbonden met het verpleegoproepsysteem. Raadpleeg hiervoor de desbetreffende handleiding.

- Verlaat de ruimte en schakel het deurcontact in bij gesloten deur (schakelaar op stand 1). Het systeem zal u alarmeren wanneer de deur wordt geopend. Een LED licht op wanneer er een alarm of sabotage melding verstuurd wordt.

Uitschakelen:

- Schakel het deurcontact uit voordat u de deur opent om de ruimte te betreden (schakelaar op stand 0).
- Stel eventueel het alarm af op uw verpleegoproepsysteem.

BATTERIJ DEURCONTACT

Voeding wordt verkregen van een 3.0 Lithium Thionyl Chloride batterij. Bij een zwakke batterijspanning zal automatisch een lage batterijspanning melding aan elk verzonden bericht worden toegevoegd. U kunt dit herkennen op de gekoppelde ontvanger (Rode led knippert) of op het batterij-icoon op de Pager. Gebruik voor vervanging van de batterij een CR2 ½ AA 3 volt. **Artikelnummer 1183**



REINIGING EN DESINFECTIE

Het reinigen van DAZA-apparatuur is eenvoudig. Het is niet nodig de batterijen te verwijderen. Schakel het apparaat uit om te voorkomen dat u tijdens het schoonmaken een alarm veroorzaakt. Gebruik een vochtige doek. Wanneer het apparaat erg vies is moet de doek tussentijds schoongespoeld worden. Hierna kunt u het laten drogen aan de lucht of drogen met een schone doek.

De volgende stoffen kunt u veilig gebruiken:

- water
- desinfectiemiddelen, zoals chloor 1000 ppm en chloor 250 ppm
- alcohol 70%

Gebruik bij het schoonmaken zeker nooit:

- bleekmiddelen
- agressieve, bijtende schoonmaakmiddelen
- schoonmaakmiddelen die ammoniak of aceton bevatten
- zepige middelen. Dit kan sporen achterlaten.

Doe het middel van uw keuze op een doek zodat deze wat vochtig wordt. Spuit of giet het schoonmaakmiddel niet direct op de apparatuur. Op die manier kan vocht via de kiertjes van de behuizing naar binnen lopen. Dompel het product nooit onder, was het niet in een wasmachine en droog het niet in een droogtrommel. Door deze schoonmaakinstructie op te volgen blijft het apparaat in optimale conditie.


VEEL GESTELDE VRAGEN

IK KRIJG GEEN ALARM WANNEER IK HET PRODUCT TEST.

Zorg bij de montage ervoor dat het markeringsstreepje op het deurcontact in de richting van de magneet zit. De maximale afstand tussen het deurcontact en de magneet mag niet meer dan 6mm bedragen.

Controleer ook de verbinding naar de Daza ontvanger en eventuele koppelkabel naar het verpleegoproepsysteem.

Neem bij twijfel altijd contact op met uw leverancier.

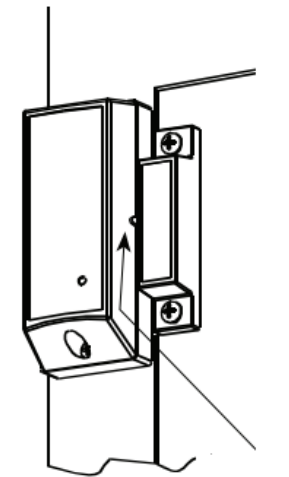

Markering