



## 7182 – Daza Optiscan


V 2020 – 1.0

### QUICKSTART GUIDE

## AAN DE SLAG

### Installatie

- 1) Plaats de sensor op de vloer op een veilige plek, kijkend in de richting van het bed.
- 2) **Plaats bij voorkeur de sensor minimaal 2 meter van het bed vandaan.**
- 3) De sensor heeft een kijkhoek van 90 graden. Zorg ervoor dat er geen objecten voor de sensor staan.

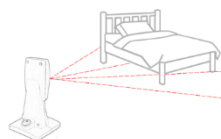

## AANZETTEN

- 1) Zorg ervoor dat de Daza ontvanger of Pager is ingeschakeld.
- 2) Zet de sensor aan door achterop de Optiscan de schakelaar op "1" te zetten.
- 3) Verlaat de kamer.
- 4) De sensor is 15 seconden na het aanzetten actief.



## UITSCHAKELEN

- 1) Loop de kamer in en zet de sensor uit (stand "0" op de schakelaar).
- 2) Stel eventueel het alarm af op het Verpleegoproep systeem of Daza Pager.

Zet u de Optiscan niet uit, dan gaat automatisch de 15 seconden regel in werking. Wanneer de sensor voor 15 seconden geen beweging ziet, dan zet de sensor zichzelf weer op actief.


## BATTERIJ VERVANGEN

### **RAAK NOOIT HET ELEMENT IN DE SENSOR AAN!**

Wanneer de led achter de lens elke 5 seconde kort rood oplicht moet de batterij van de sensor zo snel mogelijk vervangen worden.

Vervang deze alleen door een 3,6 volt lithium cel van het formaat 2/3 AA. (Daza art. nr. 7083).

- 1) Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de Optiscan
- 2) Vervang de batterij met de pluspool naar rechts.
- 3) Na het vervangen van de batterij kan de sensor enige tijd nodig hebben om te kalibreren. Dit is te zien door het regelmatig oplichten van de groene led achter de lens.

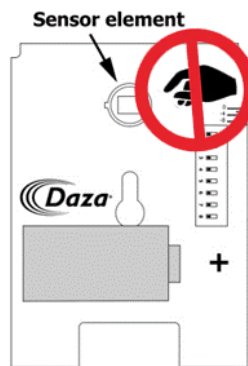

## REINIGING EN DESINFECTIE

Het reinigen van DAZA-apparatuur is eenvoudig. Het is niet nodig de batterijen te verwijderen. Schakel het apparaat uit om te voorkomen dat u tijdens het schoonmaken een alarm veroorzaakt. Gebruik een vochtige doek. Wanneer het apparaat erg vies is moet de doek tussentijds schoongespoeld worden. Hierna kunt u het laten drogen aan de lucht of drogen met een schone doek.

De volgende stoffen kunt u veilig gebruiken:

- water
- desinfectiemiddelen, zoals chloor 1000 ppm en chloor 250 ppm
- alcohol 70%

Gebruik bij het schoonmaken zeker nooit:

- bleekmiddelen
- agressieve, bijtende schoonmaakmiddelen
- schoonmaakmiddelen die ammoniak of aceton bevatten
- zepige middelen. Dit kan sporen achterlaten.

Doe het middel van uw keuze op een doek zodat deze wat vochtig wordt. Spuit of giet het schoonmaakmiddel niet direct op de apparatuur. Op die manier kan vocht via de kiertjes van de behuizing naar binnen lopen. Dompel het product nooit onder, was het niet in een wasmachine en droog het niet in een droogtrommel. Door deze schoonmaakinstructie op te volgen blijft het apparaat in optimale conditie.

## VEEL GESTELDE VRAGEN

### HET ALARM VAN DE OPTISCAN KOMT NIET MEER OP ONS VERPLEEGPROEPSYSTEEM

De Optiscan is gekoppeld aan een Daza Ontvanger. Deze zijn als set met elkaar geconfigureerd. Het is daarom belangrijk om deze producten niet te verwisselen met mogelijke andere sets binnen uw organisatie.

Daarnaast zal de Ontvanger het alarm doorsturen via de kabel die is aangesloten tussen de ontvanger en het verpleegoproepsysteem.

U kunt de werking als volgt controleren:

- Zorg dat de Daza ontvanger is ingeschakeld en is verbonden aan het verpleegoproepsysteem
- Zet de Optiscan aan en leg deze met de lens naar beneden plat op de grond en **wacht 15 seconden**.
- Terwijl u de Optiscan optilt en naar uw toe draait moet u naar twee dingen kijken:
  - o Geeft de Optiscan een groene LED? Dit is de indicatie dat de Optiscan beweging detecteert en een alarm stuurt naar de ontvanger.
  - o Brand tegelijkertijd de rode LED op de ontvanger voor minimaal 1 seconde? Dit is de indicatie dat het alarm wordt doorgegeven aan het verpleegoproepsysteem.
  - o Zit er een knik of beschadiging aan de kabel?
- Herhaal desnoods deze test om alle 3 de punten te controleren. Indien deze punten prima werken, probeer de producten dan eens uit op een andere kamer. Er kan een probleem zitten in het verpleegoproepsysteem.
- Is er wel een punt uit de test die niet lijkt te werken, neem dan direct contact op met uw leverancier.

### WIJ GEBRUIKEN GEEN BEDHEK, WAAR PLAATS IK DE OPTISCAN ALS MEN LANGS BEIDE ZIJDE HET BED KAN VERLATEN?

Bij de meeste bedden zal de Optiscan onderdoor het bed heen kijken. Ook hier geldt dan de regel om de Optiscan minimaal 2 meter bij het bed vandaan te plaatsen.

De Optiscan heeft een kijkhoek van 90 graden, waardoor deze een breed vak zal bewaken. De Optiscan kijkt ongeveer 5 meter ver.



### DE OPTISCAN GEEFT ZO NU EN DAN EEN VALS ALARM!

De Optiscan registreert warmtebeweging. De software in het product probeert waar mogelijk vals alarmen te voorkomen. Op dit proces te helpen is het raadzaam de volgende punten in acht te nemen:

- Plaats de Optiscan altijd op de grond.
- Plaats de Optiscan minimaal 2 meter bij het bed vandaan. Hierdoor verkleint u de kans op alarmen door wapperende dekens of armen naast het bed.
- Voorkom dat er direct zonlicht in de Optiscan kan schijnen.