



4010 – Daza Optiscan set


V 2025 – 1.0

QUICKSTART GUIDE

AAN DE SLAG

Installatie

- 1) Plaats de sensor op de vloer op een veilige plek, kijkend in de richting van het bed.
- 2) **Plaats bij voorkeur de sensor minimaal 2 meter van het bed vandaan.**
- 3) De sensor heeft een kijkhoek van 90 graden. Zorg ervoor dat er geen objecten voor de sensor staan.

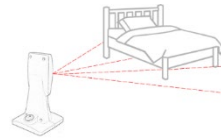

AANZETTEN

De bediening voor het aan en uitzetten van het product gebeurt op de ontvanger van de Optiscan. De Optiscan zal ten alle tijden aan blijven staan.

15 seconden regel

Bij detectie van beweging zal het product eenmalig alarmeren waarna de 15 seconden regel actief is. Wanneer de sensor voor 15 seconden geen beweging ziet, dan zet de sensor zichzelf weer op actief.

UITSCHAKELEN

Uitzetten:

1. Loop de kamer in en zet de ontvanger uit (druk op de oranje toets).
2. Stel eventueel het alarm af.

Na binnenkomst in de kamer kunt u eventueel het alarm afstellen op het verpleegoproepsysteem en kunt u de ontvanger tijdelijk uitschakelen.

Vergeet niet deze weer in te schakelen bij het verlaten van de kamer. De Optiscan is na **15 seconden**, zonder beweging weer actief.


BATTERIJ VERVANGEN

RAAK NOOIT HET ELEMENT IN DE SENSOR AAN!

Wanneer de led achter de lens elke 5 seconde kort rood oplicht moet de batterij van de sensor zo snel mogelijk vervangen worden.

Vervang deze alleen door een 3,6 volt lithium cel van het formaat 2/3 AA. (Daza art. nr. 7083).

- 1) Verwijder de 4 schroeven aan de achterkant van de Optiscan
- 2) Vervang de batterij met de pluspool naar rechts.
- 3) Na het vervangen van de batterij kan de sensor enige tijd nodig hebben om te kalibreren. Dit is te zien door het regelmatig oplichten van de groene led achter de lens.

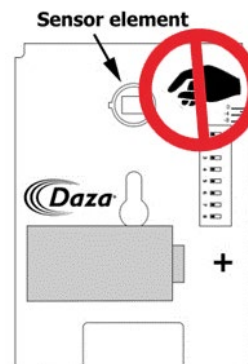

REINIGING EN DESINFECTIE

Het reinigen van DAZA-apparatuur is eenvoudig. Het is niet nodig de batterijen te verwijderen. Schakel het apparaat uit om te voorkomen dat u tijdens het schoonmaken een alarm veroorzaakt. Gebruik een vochtige doek. Wanneer het apparaat erg vies is moet de doek tussentijds schoongespoeld worden. Hierna kunt u het laten drogen aan de lucht of drogen met een schone doek.

De volgende stoffen kunt u veilig gebruiken:

- water
- desinfectiemiddelen, zoals chloor 1000 ppm en chloor 250 ppm
- alcohol 70%

Gebruik bij het schoonmaken zeker nooit:


- bleekmiddelen
- agressieve, bijtende schoonmaakmiddelen
- schoonmaakmiddelen die ammoniak of aceton bevatten
- zepige middelen. Dit kan sporen achterlaten.

Doe het middel van uw keuze op een doek zodat deze wat vochtig wordt. Spuit of giet het schoonmaakmiddel niet direct op de apparatuur. Op die manier kan vocht via de kiertjes van de behuizing naar binnen lopen. Dompel het product nooit onder, was het niet in een wasmachine en droog het niet in een droogtrommel. Door deze schoonmaakinstructie op te volgen blijft het apparaat in optimale conditie.

INSTALLATIE ONTVANGER

Installatie en gebruik:

Koppel de ontvanger aan het verpleegoproepsysteem met de daarbij behorende koppelkabel. Sluit daarna de voedingsadapter aan een nabijgelegen wandcontactdoos (figuur 1).

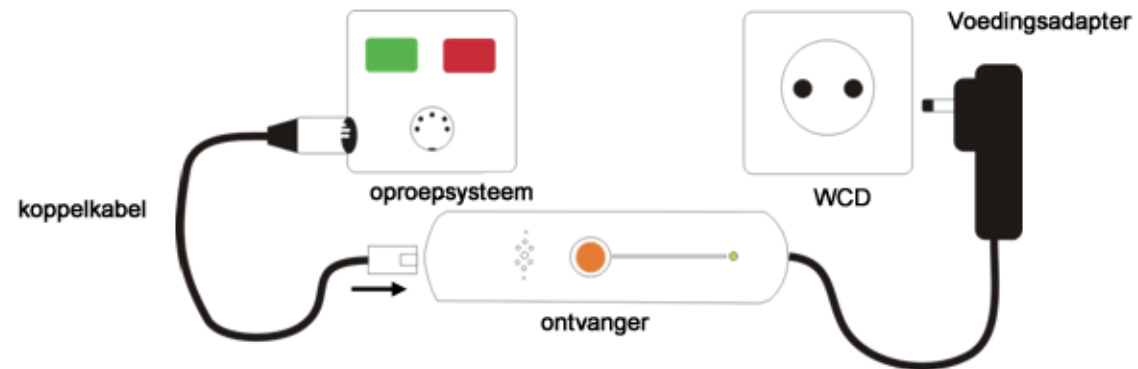

Figuur 1: Ontvanger

VEEL GESTELDE VRAGEN

HET ALARM VAN DE OPTISCAN KOMT NIET MEER OP ONS VERPLEEGOPROEPSYSTEEM

De Optiscan is gekoppeld aan een Daza Ontvanger. Deze zijn als set met elkaar geconfigureerd. Het is daarom belangrijk om deze producten niet te verwisselen met mogelijke andere sets binnen uw organisatie.

Daarnaast zal de Ontvanger het alarm doorsturen via de kabel die is aangesloten tussen de ontvanger en het verpleegoproepsysteem.

U kunt de werking als volgt controleren:

- Zorg dat de Daza ontvanger is ingeschakeld en is verbonden aan het verpleegoproepsysteem
- Zet de Optiscan aan en leg deze met de lens naar beneden plat op de grond en **wacht 15 seconden**.
- Terwijl u de Optiscan optilt en naar uw toe draait moet u naar twee dingen kijken:
 - o Geeft de Optiscan een groene LED? Dit is de indicatie dat de Optiscan beweging detecteert en een alarm stuurt naar de ontvanger.
 - o Brand tegelijkertijd de rode LED op de ontvanger voor minimaal 1 seconde? Dit is de indicatie dat het alarm wordt doorgegeven aan het verpleegoproepsysteem.
 - o Zit er een knik of beschadiging aan de kabel?
- Herhaal desnoods deze test om alle 3 de punten te controleren. Indien deze punten prima werken, probeer de producten dan eens uit op een andere kamer. Er kan een probleem zitten in het verpleegoproepsysteem.
- Is er wel een punt uit de test die niet lijkt te werken, neem dan direct contact op met uw leverancier.

Test altijd voor het gebruik of het alarm daadwerkelijk binnenkomt op de ontvanger.

WIJ GEBRUIKEN GEEN BEDHEK, WAAR PLAATS IK DE OPTISCAN ALS MEN LANGS BEIDE ZIJDE HET BED KAN VERLATEN?

Bij de meeste bedden zal de Optiscan onderdoor het bed heen kijken. Ook hier geldt dan de regel om de Optiscan minimaal 2 meter bij het bed vandaan te plaatsen.

De Optiscan heeft een kijkhoek van 90 graden, waardoor deze een breed vak zal bewaken. De Optiscan kijkt ongeveer 5 meter ver.



DE OPTISCAN GEEFT ZO NU EN DAN EEN VALS ALARM!

De Optiscan registreert warmtebeweging. De software in het product probeert waar mogelijk vals alarmen te voorkomen. Op dit proces te helpen is het raadzaam de volgende punten in acht te nemen:

- Plaats de Optiscan altijd op de grond.
- Plaats de Optiscan minimaal 2 meter bij het bed vandaan. Hierdoor verklein je de kans op alarmen door wapperende dekens of armen naast het bed.
- Voorkom dat er direct zonlicht in de Optiscan kan schijnen.