



### 4530-V2M – Daza Hals / Pols zender set Plug & Play

V 2025 – 1.0


#### QUICKSTART GUIDE

#### ALGEMEEN

De Daza hals en polszender is er in een antraciet en een rode uitvoering.

De zender kan doormiddel van het standaard bijgeleverde anti-wurgkoord om de hals worden gedragen.

Middels artikel “1184-strap” kan de zender ook om de pols worden gebruikt.

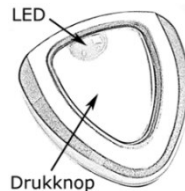

*Controleer altijd de werking van het anti-wurgkoordje. Deze moet met geringe kracht los springen bij de sluitingen. Knoop nooit zelf het touwtje, maak altijd gebruik van de bijgeleverde sluitingen.*

#### ALARMEREN

De zender wordt geactiveerd door op de drukknop te drukken. De zender zendt één alarm cyclus uit, ongeacht hoe lang er op de knop gedrukt wordt.

Wanneer de knop wordt losgelaten kan na 4 seconden het volgende alarm worden verstuurd

De zender is water en stofdicht (IP67) en kan dus zondermeer onder de douche worden gedragen.

De zender dient te worden gekoppeld op de Daza ontvanger of Pager

#### LED INDICATOR

Als de knop ingedrukt wordt licht de rode LED achter de knop op ter indicatie dat de knop goed is ingedrukt en de alarmmelding wordt verzonden.


Als tijdens het indrukken van de knop de LED knippert, is dat een teken dat de batterij bijna leeg is en deze zo snel mogelijk vervangen dient te worden.

De batterij leeg melding wordt ook met de code meegestuurd en zal dus ook kenbaar worden gemaakt op de ontvanger of Pager.

#### NEK KOORD/ STRAP

De halszender wordt standaard geleverd met een halskoord. Het halskoord is voorzien van een veiligheidssluiting. Bij een ruk aan het koord zal dit open springen om persoonlijk letsel te voorkomen

Middels artikel “1184-strap” kan de zender ook om de pols worden gebruikt. Voor het monteren van deze polsband heeft de zender niet uit elkaar gehaald te worden. Het zacht stoffen elastische bandje kan er simpel doorheen worden

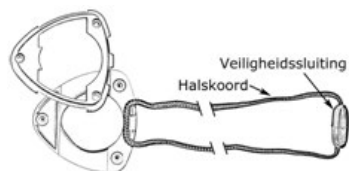

#### TRILFUNCTIE

Als extra optie is het mogelijk om een trilfunctie als feedback in te schakelen. Standaard staat deze uit. De trilfunctie kan op de volgende manier geactiveerd worden:

- Druk de knop in en houd deze ingedrukt.
- Zodra de LED gaat branden de knop loslaten en daarna meteen 2x achter elkaar op de knop drukken.
- Ter bevestiging zal de halszender nu trillen en een alarm uitzenden.

Als nu de knop ingedrukt wordt licht de rode LED achter de knop op én trilt de halszender ter indicatie dat de knop goed is ingedrukt en de alarmmelding wordt verzonden.

De trilfunctie uitschakelen gaat op dezelfde manier als inschakelen. Ter bevestiging zal de halszender alleen een alarm uitzenden.

Als tijdens het indrukken van de knop de LED knippert, is dat een teken dat de batterij bijna leeg is en deze zo snel mogelijk vervangen dient te worden. De trilfunctie wordt tijdelijk uitgeschakeld totdat de batterij vervangen is.


#### BATTERIJ VERVANGEN

De voedingspanning voor de zender wordt geleverd door een 3 Volt Lithium cel, type CR2032.

Het openen van de halszender om de batterij te vervangen gebeurt door de 3 schroeven aan de achterzijde los te draaien.

Nu kan het achterframe worden verwijderd en kan de behuizing geopend worden.

Schuif voorzichtig de batterij uit de batterijhouder. Voorkom dat er kracht op de batterijhouder komt

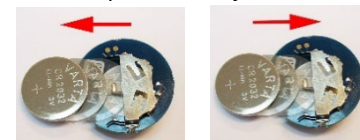

#### REINIGING EN DESINFECTIE

Het reinigen van DAZA-apparatuur is eenvoudig. Het is niet nodig de batterijen te verwijderen. Schakel de ontvanger uit om te voorkomen dat u tijdens het schoonmaken een alarm veroorzaakt. Gebruik een vochtige doek. Wanneer het apparaat erg vies is moet de doek tussentijds schoongespoeld worden. Hierna kunt u het laten drogen aan de lucht of drogen met een schone doek.

De volgende stoffen kunt u veilig gebruiken:

- water
- desinfectiemiddelen, zoals chloor 1000 ppm en chloor 250 ppm
- alcohol 70%

Gebruik bij het schoonmaken zeker nooit:

- bleekmiddelen
- agressieve, bijtende schoonmaakmiddelen
- schoonmaakmiddelen die ammoniak of aceton bevatten
- zepige middelen. Dit kan sporen achterlaten.


## INSTALLATIE/ GEBRUIK ONTVANGER

### Installatie en gebruik:

Installatie ontvanger: Koppel de ontvanger aan het verpleegoproepsysteem met de daarbij behorende koppelkabel (figuur 1).

### Uitzetten:

1. U kunt de ontvanger uitschakelen door 1x op de oranje toets te drukken (let op u ontvangt hierna geen alarmen)
2. Indien er al een alarmmelding aanwezig is moet u deze eerst afstellen voordat u de ontvanger kunt uitschakelen.

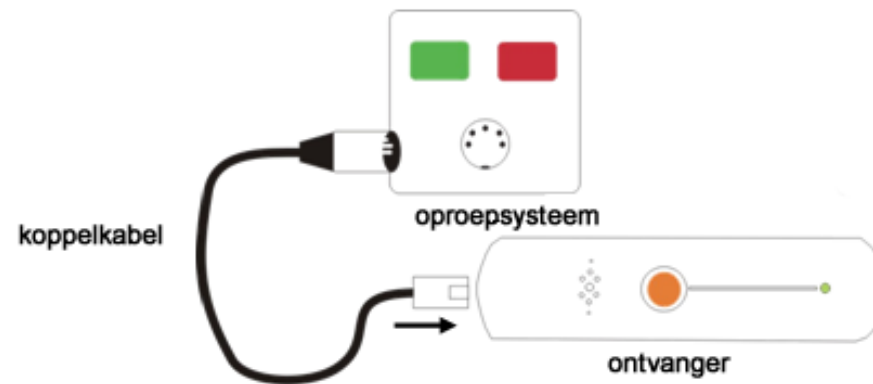

Figuur 1: Ontvanger