



7190 – Daza Bedscan

V 2023 – 1.1

QUICKSTART GUIDE

AAN DE SLAG

Installatie

Plaats de Bedscan altijd in het **midden** van het voetenbord. Zorg ervoor dat deze rechtop wordt geplaatst. Draai de knop van de klem aan totdat deze stevig vast zit. De ideale hoogte van de Bedscan kop tot aan het matras zit tussen de 40-50 cm.

Belangrijk: De Bedscan controleert tijdens het aanzetten of deze recht staat. Indien dit niet het geval is, dan zal de Bedscan gaan piepen totdat u deze correct plaatst.

De LED's achter de nummers 1..6 zullen knipperen ter indicatie welke kant de Bedscan schuin staat.



LED 1 & 2 : Bedscan is gekanteld naar links

LED 5 & 6 : Bedscan is gekanteld naar rechts

LED 3 & 4 : Bedscan is gekanteld naar voren

LED 1 & 6 : Bedscan is gekanteld naar achteren

Let Op: Indien er een antidecubituspomp aan het voeteneind hangt, kan deze door de trilling ervoor zorgen dat de Bedscan zich niet goed opstart en blijft knipperen. Controleer dit goed tijdens het aanzetten van de Bedscan.

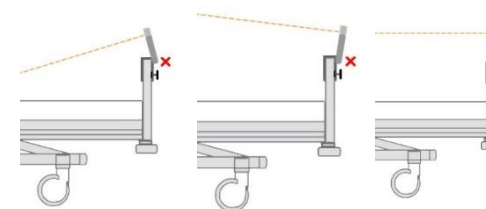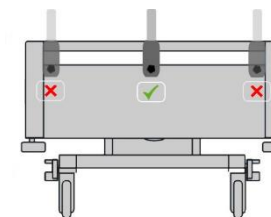

Bedscan AAN zetten

Wanneer u de kamer gaat verlaten en de bewoner ligt in bed, schakel dan de Bedscan in.

Druk 3 seconden op OK.

U hoort een pieptoon van laag naar hoog, **het systeem is na 15 seconden actief**. Het lampje brandt op het ingestelde alarmeringsmoment (zie ommezijde).

Let op: Wanneer de Bedscan een tijd niet is gebruikt, moet deze zichzelf kalibreren. U kunt dit herkennen doordat de Bedscan alle lampjes één voor één laat knipperen wanneer u deze aanzet. Wacht totdat de procedure is afgerond. De Bedscan start hierna automatisch op.

Batterij leeg indicatie

Wanneer de Bedscan 5x kort piept, betekent dit dat de batterij vervangen dient te worden.



Bedscan UIT zetten

Schakel de Bedscan altijd uit na alarmering of bij het betreden van het bed.

Vergeet niet deze weer aan te zetten voordat u de kamer/ ruimte verlaat!

Druk 3 seconden op OK.

U hoort een pieptoon van hoog naar laag en het systeem schakelt zich uit.

Voorkom aanraking met de lens aan de voorzijde van de Bedscan. Dit kan de lens doen beschadigen. Daarnaast veroorzaakt uw lichaamswarmte verkeerde meetwaarden.



Instellen van het alarmeringsmoment

Druk minimaal 3 seconden op beide pijltjes toetsen.

Er klinkt een korte pieptoon. U kunt beide toetsen loslaten.

Klik vervolgens op één van de pijltjes toetsen om te scrollen door het keuze menu en u op de gewenste alarmstand staat.



Bevestig uw keuze altijd met de OK knop

LET OP: Indien u niet bevestigt met de OK toets dan zal de Bedscan automatisch terugspringen naar de stand die al stond ingesteld.



1 Zit in bed

Alarm: persoon zit rechtop in bed



2 Zit op de rand

Alarm: persoon zit op de rand van het bed



3 Uit bed

Alarm: persoon stapt uit bed en loopt weg



4 Langer dan 5 minuten uit bed

Alarm: persoon is niet terug in bed binnen 5 minuten



5 Langer dan 10 minuten uit bed

Alarm: persoon is niet terug in bed binnen 10 minuten



6 Langer dan 15 minuten uit bed

Alarm: persoon is niet terug in bed binnen 15 minuten

Sabotage

The Bedscan zal alarmeren wanneer deze wordt gesaboteerd. Voorbeeld:

- Wanneer er een deken overheen wordt gegooid. LED's 2,3,4,5 zullen knipperen
- Wanneer de Bedscan van het bed wordt gehaald wanneer deze aan staat. LED's 1,2 & 5,6 zullen knipperen.



REINIGING EN DESINFECTIE

Het reinigen van DAZA-apparatuur is eenvoudig. Het is niet nodig de batterijen te verwijderen. Schakel het apparaat uit om te voorkomen dat u tijdens het schoonmaken een alarm veroorzaakt. Gebruik een vochtige doek. Wanneer het apparaat erg vies is moet de doek tussentijds schoongespoeld worden. Hierna kunt u het laten drogen aan de lucht of drogen met een schone doek.

De volgende stoffen kunt u veilig gebruiken:

- water
- desinfectiemiddelen, zoals chloor 1000 ppm en chloor 250 ppm
- alcohol 70%

Gebruik bij het schoonmaken zeker nooit:

- bleekmiddelen
- agressieve, bijtende schoonmaakmiddelen
- schoonmaakmiddelen die ammoniak of aceton bevatten
- zepige middelen. Dit kan sporen achterlaten.

Doe het middel van uw keuze op een doek zodat deze wat vochtig wordt. Spuit of giet het schoonmaakmiddel niet direct op de apparatuur. Op die manier kan vocht via de kiertjes van de behuizing naar binnen lopen. Dompel het product nooit onder, was het niet in een wasmachine en droog het niet in een droogtrommel. Door deze schoonmaakinstructie op te volgen blijft het apparaat in optimale conditie.

Vervangen van de batterij of zender

Batterij leeg indicatie

Wanneer de Bedscan 5x kort piept, betekent dit dat de batterij binnenkort vervangen dient te worden. Wanneer alle LED-jes knipperen, dient de batterij onmiddellijk vervangen te worden.

Een lege batterij van de ingebouwde zender wordt via de gebruikelijke weg gemeld. Informeer eventueel hiervoor bij uw verpleegoproep systeem leverancier.

Benodigheden: Torx 7 schroevendraaier en H3 Inbus sleutel.



Draai de twee inbusbouten los van de Bedscan.
Gebruik hiervoor de H3 Inbus sleutel.
Verwijder daarna de beschermbeugel.



Draai vervolgens het boutje los die de Bedscan kop borgt.
Gebruik hiervoor de Torx 7 schroevendraaier.



Trek voorzichtig de Bedscan kop met behuizing uit de aluminium buis.

Verwijder de batterij en vervang deze door een nieuwe:
Belangrijk, gebruik alleen de Saft LSH20 batterij.
Artikelnummer 7084

Monteer de kop met houder terug in omgekeerde volgorde.

Test het product altijd voordat deze weer wordt ingezet.
Volg eventueel nevenstaande procedure als de Bedscan niet goed opstart (ook als het een nieuwe batterij betreft).

Testalarm

Na het aanzetten van de Bedscan kunt u een testalarm versturen. Hiermee controleert u of het alarm aankomt op de gekoppelde ontvanger.

- Zorg dat de Bedscan AAN staat, rechtup en niet in alarm
- Druk daarna 5x kort achter elkaar op de OK toets totdat u een Pieptoon hoort.
- Een test alarm wordt nu verstuurd via de ingebouwde zender



Batterij procedure na opstarten Bedscan

Wanneer de Bedscan een tijd niet is gebruikt, kan het voorkomen dat de batterij samenstelling verzadigd. Dit verschijnsel kan ervoor zorgen dat de Bedscan niet goed opstart. Bij het aanzetten van het product wordt dit door de Bedscan gecontroleerd. Het kan daarom de eerste keer langer duren voordat het systeem opstart.

U kunt dit als volgt herkennen.

- Druk op de OK toets totdat u de Bedscan hoort opstarten. Normaal gebeurt dit na 3 seconden.
- Gebeurt dit niet, houdt dan de knop net zolang ingedrukt totdat u de rode lampjes 1 voor 1 ziet aangaan in een patroon van links naar rechts en terug.
- De batterij wordt nu gekalibreerd.
- Na deze procedure hoort u de Bedscan opstarten.
- Het is wenselijk dat u de Bedscan daarna nogmaals Uit & Aan zet om er zeker van te zijn, dat deze goed opstart.